

Gebruiksaanwijzing SWS Wireless

A →



← B

A Functie- en verstellingtoetsen



Hoofd- en voeteneinde omhoog



Hoofdeinde omhoog



Voeteneinde omhoog



Hoofd- en voeteneinde omlaag



Hoofdeinde omlaag



Voeteneinde omlaag


B Knopje voor openen batterijcompartiment

Inleren van een bediening op een motor:

Steek eerst de stekker in het stopcontact en zorg dat de batterijen juist in de bediening zijn geplaatst.

- 1 Druk 2 x kort op de functietoets van de motor (A).
- 2 De LED gaat branden. De ontvanger in de motor staat nu voor 30 seconden in de leermodus.
- 3 De MIDDELSTE twee toetsen van de bediening **GELIJKTIJDIG** indrukken, tot de LED uit gaat.
- 4 De bediening kan vervolgens gebruikt worden.

A

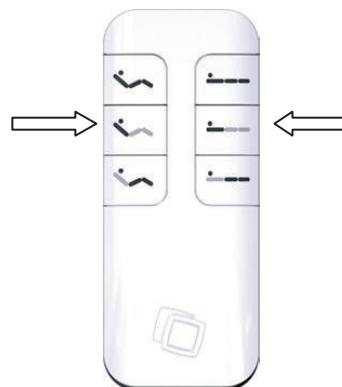

Inleren van één bediening op TWEE motoren (synchroonbediening):

De bediening moet eerst ingeleerd zijn op de eerste motor volgens de bovenstaande procedure 'Inleren van een bediening op een motor'.

Steek eerst de stekker in het stopcontact en zorg dat de batterijen juist in de bediening zijn geplaatst.

- 1 Druk 2 x kort op de functietoets van de motor (A).
- 2 De LED gaat branden. De ontvanger in de motor staat nu voor 30 seconden in de leermodus.
- 3 De ONDERSTE twee toetsen van de bediening GELIJKTIJDIG indrukken, tot de LED uit gaat.
- 4 De bediening kan vervolgens gebruikt worden op TWEE motoren tegelijk.



Resetten motor om vervolgens opnieuw in te leren:

Haal eerst de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 seconden en steek de stekker weer terug in het stopcontact.


- 1 Druk 4 x kort op de functietoets van de motor (A).
- 2 De LED in de functietoets (A) gaat branden. Wacht 2 seconden.
- 3 Druk 1 x kort op de functietoets van de motor (A).
- 4 De LED in de functietoets (A) gaat uit.
- 5 De motor is nu gereset. Er kan opnieuw begonnen worden met het aanleren van de bediening.

Zaklampfunctie:

Met de grijze toets aan de linkerkant van de bediening kan de zaklamp geactiveerd worden. De grijze toets aan de rechterkant van de bediening heeft geen functie.

Plaatsen/ verwisselen van de batterijen:

- 1 Druk **VOORZICHTIG** op het knopje aan de zijkant van de bediening om het batterijcompartiment te openen.
- 2 Trek het batterijcompartiment voorzichtig uit de bediening.
- 3 Plaats de batterijen zoals aangegeven op de afbeeldingen in het batterijvak. Let op de juiste polering! Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- 4 Plaats het batterijcompartiment terug in de bediening tot deze vast klikt.

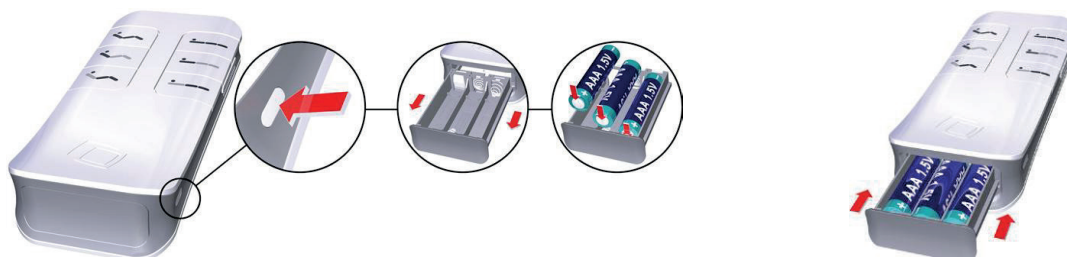

Veiligheidsinstructies:

- De bediening is alleen geschikt voor thuisgebruik
- De bediening is niet geschikt voor gebruik in een medische omgeving, zoals een ziekenhuis.
- De bediening is niet geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving of buitengebruik.
- De bediening kan alleen gereinigd worden met een licht vochtige doek.
- De bediening is geen speelgoed.

Problemen oplossen:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De bediening werkt niet	Stekker van de motor los	Steek de stekker in het stopcontact
	Lege batterijen	Vervang de batterijen
	Batterijen verkeerd geplaatst	Let op de polering zoals afgebeeld in de batterijhouder
	De bediening is niet ingeleerd op de motor	Volg de instructie voor inleren. Eventueel eerst resetten
	De afstand tussen de bediening is te groot	Ga dichterbij het bed staan
	Bediening of motor is defect	Neem contact op met de klantenservice
• De motor werkt niet	De bediening is gevallen	Neem contact op met de klantenservice
	Stekker van de motor los	Steek de stekker in het stopcontact
	Stroom tijdelijk uitgevallen	Noodverstelling*
• De zaklamp werkt niet	Motor defect	Neem contact op met de klantenservice
	Batterijspanning is laag	Vervang de batterijen

* Noodverstelling: De motor is voorzien van één of twee 9V-batterijen. Deze batterijen hebben voldoende spanning om bij stroomuitval de boxspring eenmalig naar de vlakke stand te verstellen. Na deze noodverstelling zullen de batterijen vervangen moeten worden.

Klantenservice: T. +31 (0)413 820 888 (Ma. t/m Vr. 09:00 – 17:30 uur)
F. +31 (0)413 820 887
@. klantenservice@swissense.nl